

CHiL COVID-19 Antigen Schnelltest Selbsttest nasal

Inhalt: 5 Stück

PZN: 18232544

Bulletpoints:

- Hohe Sensitivität (98,75 %) und Spezifität (99,72 %)
- schmerzfreie Probeentnahme: vorderer Nasenabstrich
- Erkennt auch Virus-Mutationen, z.B. Omikron

Der CHiL COVID-19 Antigen Schnelltest ist ein CE-zertifizierter Heimtest für die Eigenanwendung durch Laien. Die Probenentnahme erfolgt durch einen Abstrich im vorderen Teil der Nase und ist schmerzfrei und angenehm durchzuführen.

Eigenschaften des Tests:

- Sensitivität: 98,75 % (95 % CI: 97,44 % – 99,50 %)*
- Spezifität: 99,72 % (95 % CI: 99,18 % – 99,94 %)*
- Genauigkeit: 99,67 % (95 % CI: 99,25 % – 99,89 %)*
- Nachweisgrenze / LoD-Wert: 30 TCID₅₀/ml

Welche Vorteile hat der CHiL COVID-19 Antigen Schnelltest?

- Schnelltest für den vorderen Nasen-Bereich
- CE-zertifiziert (CE 1023)
- Auf der Gemeinsamen Liste der Corona-Antigen-Schnelltests: Ref.-Nr: 3864
- Evaluiert nach den Richtlinien des RKI und Paul-Ehrlich-Instituts
- erkennt auch Mutationen, wie z.B. Omikron
- schnelles Ergebnis innerhalb von 15 Minuten
- Weniger Kontaminierungsgefahr der Probe durch einzigartiger 2-seitiger Pufferlösungsflasche (Liquidtube)
- Auswertung ortsunabhängig, ohne Labor

Lieferumfang:

- 5 x Testkassette
- 5 x Röhrchen mit Extraktionslösung
- 5 x Nasal-Abstrichtupfer
- 1 x Gebrauchsanweisung

Zusätzlich benötigte Materialien:

- Uhr, Zeitgeber oder Stoppuhr

Anwendung:

1. Waschen oder desinfizieren Sie Ihre Hände, bevor Sie mit dem Testen anfangen und stellen Sie sicher, dass die Hände trocken sind.
2. Öffnen Sie den Verpackungsbeutel der Testkassette. Entnehmen Sie die Testkassette und legen Sie sie auf eine ebene, trockene Oberfläche.
3. Nehmen Sie den Tupfer aus der Verpackung. Achten Sie darauf, dass Sie den Kopf des Tupfers nicht berühren.

4. Führen Sie den Tupfer vorsichtig etwa 1,5 - 2,5 cm tief in ein Nasenloch ein. Wenn Sie einen Widerstand spüren, hören Sie auf, den Tupfer in die Nase einzuführen.
5. Drehen Sie den Tupfer 5-6-mal gegen die Innenseite des Nasenlochs. Dieser Vorgang sollte etwa 15 Sekunden dauern. Entfernen Sie dann den Tupfer aus Ihrer Nase.
6. Wiederholen Sie die Schritte 04 und 05 mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch.
7. Öffnen Sie den Verschluss des Extraktionsröhrchens. Führen Sie den Tupfer in die Flüssigkeit im Extraktionsröhrchen ein. Drehen Sie den Tupfer 5-6-mal in der Flüssigkeit und drücken Sie den Tupfer gegen die Wand und den Boden des Röhrchens.
8. Drücken Sie das Extraktionsröhrchen mehrmals von außen zusammen, während Sie den Tupfer herausziehen, um die Flüssigkeit möglichst vollständig aus der Tupferspitze zu entfernen.
9. Verschließen Sie das Extraktionsröhrchen fest mit der Kappe. Drehen Sie das Röhrchen um und entfernen Sie die Spitze, indem Sie sie abbrechen. Wichtig: Halten Sie das Röhrchen senkrecht nach oben, um ein Verschütten der Flüssigkeit zu vermeiden. Drehen Sie dann das Röhrchen vorsichtig um, damit Sie die Flüssigkeit auf die Testkassette tropfen können. Achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit in den konischen Teil gelangt. Bei Bedarf können Sie leicht darauf klopfen, damit die Flüssigkeit heruntertropft.
10. Geben Sie genau **4 Tropfen** in die Probenvertiefung der Testkassette. Die exakte Tropfenmenge ist entscheidend für ein zuverlässiges Ergebnis. Stellen Sie sicher, dass die Probenvertiefung frei von Fremdkörpern ist.
11. Stellen Sie die Stoppuhr / den Timer ein und **lesen Sie das Ergebnis innerhalb von 15-30 Minuten** ab. Ergebnisse, die nach 30 Minuten abgelesen werden, sind nicht mehr gültig und der Test muss wiederholt werden.
12. Bitte legen Sie nach dem Ablesen des Testergebnisses alle verwendeten Materialien in eine reißfeste Plastiktüte, die Sie verschließen und mit dem Restmüll entsorgen. Waschen oder desinfizieren Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab.

Interpretation des Testergebnisses:

POSITIV

Wenn **sowohl die Kontrolllinie (C) als auch die Testlinie (T) angezeigt werden**, bedeutet dies, dass Sie sehr wahrscheinlich **COVID-19 haben**. Auch wenn die Testlinie nur schwach sichtbar ist, ist das Ergebnis als positiv zu interpretieren.

Bitte wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt oder das örtliche Gesundheitsamt und halten Sie sich an die örtlichen Richtlinien zur Selbstisolation. Ein weiterer Test wie ein PCR-Test kann erforderlich sein, um das Testergebnis zu bestätigen.

NEGATIV

Wird **nur die Kontrolllinie (C)** angezeigt, ist das Ergebnis als **negativ** zu bewerten. Dies bedeutet, dass sie **wahrscheinlich kein COVID-19** haben. Dieses Ergebnis ist jedoch nur eine Vordiagnose, daher müssen Sie weiterhin alle Schutz- und Hygienemaßnahmen einhalten.

Wiederholen Sie den Test bei Verdacht auf COVID-19 nach 1-2 Tagen, da er das Virus nicht in allen Phasen der Infektion genau nachweisen kann. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

UNGÜLTIG

Wenn **keine Kontrolllinie (C)** angezeigt wird, unabhängig davon, ob eine Testlinie (T) vorhanden ist oder nicht, ist der Test ungültig. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Testset.