



Bezeichnung	<b>Nackenwärmer - MOORnatur</b>
Artikelnummer	12477339
Beschreibung	Nackenwärmer mit Naturmoor gefüllt. Baumwollhülle im Lieferumfang enthalten. Außenhülle waschbar. Medizinisches Produkt. <b>Geeignet für Mikrowelle und Backofen.</b>
Material	Füllung 100% Naturmoor Hülle 100% Baumwolle Wärmer 100% phthalatfreie PVC-Folie
EAN	4260418740554
Zolltarif-Nr.	68152000
Verpackung	1 Stück
Gewicht	Ca. 930 Gramm
Größe L/B/H	ca. 39,5 x 28 x 2 cm
Verpackung L/B/H	ca. 18 x 22,5 x 4 cm
Hersteller	Marvida GmbH & Co KG
Ursprungsland	Made in Germany

#### Information, Anwendung und Einsatzbereiche

Alle »MOORnatur«-Produkte sind echte Medizinprodukte. Die transparente, hygienische Hülle aus phthalatfreier PVC-Folie ist mit 100 % Naturmoor gefüllt. Die Moor-Päckchen lassen sich gut formen und passen sich der zu behandelnden Körperregion perfekt an. Hautfreundlich verpackt in einer Baumwollhülle spenden »MOOR- natur«-Produkte bis zu drei Stunden lang heilsame Tiefenwärme.

**Zur Wärmetherapie** 10–15 Minuten in heißes (nicht kochendes) Wasser legen oder 2–3 Minuten bei max. 500 Watt in der Mikrowelle. **Für die Kältetherapie** einfach im Kühlschrank aufbewahren oder 10–15 Minuten im Gefrierfach herunterkühlen.



## GEBRAUCHSHINWEISE

(Bitte lesen Sie die folgenden Gebrauchshinweise gut durch und bewahren sie diese auf.)

**WÄRMEANWENDUNG:** Anwendung in der Wärmetherapie – besonders bei Verspannungen und Muskelschmerzen. Wärmetherapie wird überwiegend als angenehm, entspannend empfunden. Die Wirkung von Wärme sorgt für die Entspannung der Muskulatur und verbessert die Durchblutung des erwärmten Gewebes. Dies regt den körpereigenen Stoffwechsel an, steigert die Sauerstoffzufuhr der Muskulatur und unterstützt damit die Schmerzlinderung und das Wohlbefinden. Die Anwendung kann z.B., erfolgen bei: Rückenschmerzen und Hexenschuss (Lumbago), Bandscheibenvorfall, Arthrose (nicht entzündlich), muskulären Verspannungen wie Schulter- oder Nackenverspannungen, Menstruationsbeschwerden, Linderung von Schmerzen wie z.B. Kopfschmerzen.

**Mikrowelle:** bei max. 750 Watt ca. 2 Minuten erwärmen, alle zwei Minuten stoppen und Kissen durchkneten, bei Bedarf in 15-Sekunden-Schritten verlängern. **Backofen:** auf Teller legen, bei max. 120° C ca. 10 Minuten erwärmen, nicht vorwärmen, bei Bedarf in 2-Minuten-Schritten verlängern. **Kochtopf:** ca. 5 Minuten in heißes Wasser legen. Das Wasser darf nicht kochen.

**ACHTUNG! Sollte sich das MOORNatur-Wärmeprodukt aufblähen, sofort die Mikrowelle ausschalten! MOORNatur-Wärmeprodukt beim Erwärmen nicht unbeaufsichtigt lassen! Das MOORNatur-Wärmeprodukt kann sehr heiß werden – Verbrennungsgefahr! Vor der Wärmeanwendung die Temperatur am Unterarm vorsichtig testen und ggf. abkühlen lassen. Nicht im Grill erwärmen!**

**KÄLTEANWENDUNG:** Anwendung in der Kältetherapie – bei Entzündungen. Die Kältetherapie wird zur lokalen Schmerzbehandlung eingesetzt, die Wirkung der Kälte sorgt für Schmerzlinderung bei stumpfen Schmerzen und Prellungen und hemmt entzündungsauslösende Faktoren. Die Kältetherapie kann unter anderem angewendet werden bei Schmerzen und Schwellungen, Prellungen, Ödemen, Hämatomen, Insektenstichen, Migräne, nach Traumen oder Operationen und bei Verbrennungen. MOORNatur-Wärmeprodukte zur Kühlung für ca. eine Stunde nur in den Kühlschränken legen, niemals ins Gefrierfach! Nicht verwenden bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom! Bei Kreislaufbeschwerden und anderen Vorerkrankungen sowie bei Fragen zur Anwendung kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Therapeuten.

**WICHTIGE WARNHINWEISE:** Vor dem Erwärmen oder Kühlen der MOORNatur-Wärmeprodukte, diese bitte aus der Stoffhülle entnehmen und erst nach der Erwärmung wieder einlegen. Nur zur äußeren Anwendung – nicht auf offene Wunden geben. Bitte verwenden Sie die MOORNatur-Wärmeprodukte immer in Verbindung mit der mitgelieferten passenden Stoffhülle, nicht auf die unbedeckte Haut legen. Beim Auftreten allergischer Hautreaktionen Verwendung einstellen. Nicht für Kleinkinder geeignet! Kein Kinderspielzeug! Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden! Hantieren mit spitzen Gegenständen oder heißen Metallteilen im Bereich der MOORNatur-Wärmeprodukte können zu Beschädigungen der Wärmekissenfolie führen. Bei Moorausstritt und Kontakt mit Haut oder Augen sofort mit Wasser ab- bzw. ausspülen und Kissen entsorgen. Kein Kosmetikprodukt, deshalb für Moorbäder oder Moorpackungen nicht geeignet! Inhalt nicht zum Verzehr geeignet! Die Wärmeprodukte bei Undichtigkeit und Beschädigungen nicht mehr verwenden. Überhitzen kann die MOORNatur-Wärmeprodukte beschädigen und funktionsuntüchtig machen. Die Bedienungsanleitung ist sorgfältig aufzubewahren. Für Folgeschäden kann keine Garantie übernommen werden.

**Pflegehinweise:** Bewahren Sie die MOORNatur-Wärmeprodukte bei Zimmertemperatur in der Originalverpackung an einem trockenen Ort auf. Nach der Benutzung können die MOORNatur-Wärmeprodukte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Der Baumwollbezug kann in der Waschmaschine bei 40°C unter Verwendung von Feinwaschmitteln gewaschen werden. Bitte vor dem Waschvorgang die Klettverschlüsse ordnungsgemäß schließen. Entsorgungshinweise: Entsorgung im Hausmüll.