

GEBRAUCHSANWEISUNG

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,



wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Kneipp Wärmepflaster und danken für Ihr Vertrauen. Um eine optimale Funktion und Leistungsbereitschaft des Medizinproduktes zu gewährleisten, bitten wir Sie, vor der ersten Anwendung die Gebrauchsanweisung zu lesen.

HINWEIS: Der Hersteller kann keine Haftung für Schäden oder Unfälle übernehmen, die durch Nichtbeachten dieser Gebrauchsanweisung entstehen!

Das Kneipp Wärmepflaster KN1 eignet sich bestens für Wärmeanwendungen am Körper. Das flexible und hautfreundliche Wärmepflaster wird einfach auf die gewünschte Körperregion aufgeklebt. Beim Öffnen der Pflasterverpackung werden die Inhaltsstoffe durch Sauerstoffzufuhr aktiviert und es erfolgt eine Wärmeabgabe bis zu ca. 8 Stunden. Die Wärmeanwendung empfiehlt sich bei Verspannungen, rheumatischen Beschwerden, Muskel- und Gelenkschmerzen, Muskelkater, Verstauchungen und Zerrungen.

1.0 Was bedeuten die Symbole?

Die Sicherheitssymbole, welche in dieser Gebrauchsanweisung gezeigt werden, sind Hinweise zum ordnungsgemäßen Gebrauch des Wärmepflasters und zum Schutze Ihrer Sicherheit.



Gebrauchsanweisung lesen und beachten!



Verpackung umweltgerecht entsorgen



Warnung/Gefahr:

Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht die Gefahr von ernsthaften Verletzungen, Schäden und Lebensgefahr!



Entsorgungshinweis Pappe



Nicht wiederverwenden!



Bestellnummer



Chargenbezeichnung



Das Wärmepflaster ist konform gemäß der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.



Verwendbar bis, siehe Siegelrand



Hersteller



SICHERHEITSHINWEISE

2.0 Sicherheitshinweise



- 2.0.1 Das Wärmepflaster ist ausschließlich zur äußerlichen Anwendung am Körper des Menschen bestimmt. Es kann nur einmalig eine Wärmeanwendung erfolgen. Das Pflaster ist nicht wieder erwärmbar. Ein missbräuchlicher und nicht anwendungsorientierter Einsatz muss vermieden werden. **ACHTUNG: Verbrennungsgefahr!**
- 2.0.2 Sollten während der Anwendung des Wärmepflasters Hautveränderungen wie Blasenbildung, Rötungen, Juckreiz, Schmerzen oder andere Unregelmäßigkeiten auftreten, beenden Sie sofort die Anwendung und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- 2.0.3 Falls Sie irgendwelche Zweifel bezüglich der Anwendung des Wärmepflasters haben, sollten Sie vorher Ihren Arzt befragen.
- 2.0.4 Bringen Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände in Kontakt mit dem Wärmepflaster. Das Wärmepflaster darf nicht geknickt oder zugeschnitten werden. Im Falle eines Defektes oder einer Beschädigung darf das Wärmepflaster nicht mehr verwendet werden.
- 2.0.5 Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung während der Lebenszeit des Produktes für Fragen auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Wärmepflasters an Dritte ebenfalls mit aus. Machen Sie die Anleitung auch Dritten zugänglich. Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Wärmepflasters.
- 2.0.6 Lassen Sie das Wärmepflaster nicht in Kinderhände gelangen. Beaufsichtigen Sie Kinder, dass sie nicht mit dem Wärmepflaster spielen.
- 2.0.7 Folgende Personen sollten das Wärmepflaster nicht benutzen: Schwangere, Säuglinge, Kinder, Personen die sich nicht bemerkbar machen können, Allergiker, Personen mit Immunschwäche, Personen mit Schmerzen aus ungeklärter Ursache, Diabetes oder Kreislaufbeschwerden sowie Personen mit Durchblutungsstörungen der äußeren Arterien und Gewebe oder Herz-Kreislaufkrankungen. Fragen Sie im Zweifelsfall immer Ihren Arzt!
- 2.0.8 Sollte eine Person Wärme nicht richtig wahrnehmen können, darf keine Wärmeanwendung mit dem Wärmepflaster durchgeführt werden! Kleinkinder sind empfindlicher gegen Wärme! Gebrechliche und eingeschränkte Personen könnten sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn eine zu heiße Temperatur erreicht wird.
- 2.0.9 Das Wärmepflaster darf nicht auf offenen Wunden, Nervenschäden, Hautentzündungen, empfindlichen Hautpartien, frischen Narben und Unregelmäßigkeiten angewendet werden.
- 2.1.0 Sollte sich das Wärmepflaster unangenehm oder zu heiß anfüllen, entfernen Sie es sofort von Ihrem Körper. Bereits ab 48 °C (Grad Celsius) können Verbrennungen auftreten. **ACHTUNG: Verbrennungsgefahr!**
- 2.1.1 Sorgen Sie für eine Luftzirkulation über dem Wärmepflaster, um eine Überhitzung zu vermeiden. Vermeiden Sie enganliegende Kleidung und sitzen oder liegen Sie nicht auf dem Wärmepflaster. Verwenden Sie das Wärmepflaster nicht während des Schlafens, sportlicher Aktivitäten, bei Erfrierungen oder direkt nach einem Bad oder Saunagang. Bei falscher Anwendung kann es zu Verbrennungen kommen! **ACHTUNG: Verbrennungsgefahr!**
- 2.1.2 Nicht in den Mund nehmen. Die Inhaltsstoffe des Wärmepflasters enthalten Eisen und können schädlich sein! Falls Inhaltsstoffe verschluckt werden, sofort den Mund mit klarem Wasser mehrmals ausspülen. Erfolgt ein direkter Kontakt mit den Augen oder der Haut,

ANWENDUNG

sollten Sie diese sofort mit klarem Wasser spülen. Konsultieren Sie danach sofort einen Arzt oder eine Vergiftungszentrale (bei Verschlucken).

- 2.1.3 Das Wärmepflaster darf nicht in Verbindung mit anderen Wärmequellen oder Mitteln, wie z.B. Flüssigkeiten, Kosmetika oder medizinische Lotionen, verwendet werden.
- 2.1.4 Das Wärmepflaster darf nicht gedrückt, geknetet, zerschnitten, zerrissen oder verbrannt werden. Erhitzen Sie das Wärmepflaster nicht in der Mikrowelle, im Ofen oder mit einem Heißluftgebläse. **ACHTUNG: Brandgefahr!**
- 2.1.5 Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie rheumatische Arthritis, schlechte Durchblutung, Nervenschäden, Sensibilitätsstörungen, eine Hauterkrankung haben, Diabetiker oder schwanger sind.
- 2.1.6 Kleben Sie das Wärmepflaster nicht auf Kleidungsstücke.
- 2.1.7 Kontraindikationen! Das Wärmepflaster nicht anwenden bei: in den ersten 24 Stunden einer traumatischen Verletzung, aktive Blutungen, Brandwunden, Verbrennungen, akuten rheumatischen Entzündungen, Frische oder mögliche Blutungen, Thrombosen, Krebs jeglicher Art Bestrahlung der Augen (Infrarot Bestrahlung), Fieber oder ähnlichen Infekten, Hautinfektion, auf Körperregionen die einer Röntgenstrahlungstherapie unterzogen wurden, im Bereich von Metallimplantaten, venösen Geschwüren jeglicher Art und Unregelmäßigkeiten.

3.0 Lieferumfang

2 × Kneipp Wärmepflaster KN1; Größe: ca. 176 × 95 mm, 1 × Gebrauchsanweisung

4.0 Anwendung des Kneipp® Wärmepflasters

VOR DEM ÖFFNEN DES WÄRMEPFLASTERS:

Öffnen Sie die Pflasterverpackung erst kurz vor der Anwendung! Durch das Öffnen der Pflasterverpackung wird das Wärmepflaster sofort aktiv! Sorgen Sie für eine saubere und trockene Haut an der Anwendungsstelle, gegebenenfalls reinigen Sie die entsprechende Hautregion. Üben Sie mit dem ungeöffnetem Pflaster die Klebeposition auf der Körperregion aus, damit das Pflaster bei Aufkleben gleich an der richtigen Position sitzt. Durch ein Abziehen des Pflasters und einem zweiten Aufkleben geht die Klebekraft des Pflasters verloren.

4.1 Wärmeanwendung mit Kneipp® Wärmepflaster

1. Reißen Sie die Verpackung am Seitenrand mit der Hand auf (nicht aufschneiden) und entnehmen Sie das Wärmepflaster.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite des Wärmepflasters.
3. Kleben Sie das Wärmepflaster mit der Klebeseite direkt auf die Haut über dem Schmerzbereich auf und drücken Sie das Pflaster mit den Fingern leicht an. Es dürfen sich keine Falten oder Wülste bilden. Es besteht sonst die Gefahr von Brandwunden. **ACHTUNG: Verbrennungsgefahr!**
4. Das Wärmepflaster erwärmt sich nach dem Öffnen langsam und ist dann für ca. 8 Stunden aktiv. Nach ca. 30 Minuten hat das Wärmepflaster seine Höchsttemperatur erreicht.
5. Sorgen Sie für eine Luftzirkulation über dem Pflaster, um eine Überhitzung zu vermeiden.

PFLEGE/DATEN/GEWÄHRLEISTUNG

Vermeiden Sie enganliegende Kleidung und sitzen oder liegen Sie nicht auf dem Pflaster. Überwachen Sie die Anwendung regelmäßig!

6. Falls das Wärmepflaster zu heiß wird oder sich Unregelmäßigkeiten bilden, ist die Anwendung sofort zu beenden. **ACHTUNG: Verbrennungsgefahr!**
7. Nach der Anwendung das Wärmepflaster von der Haut entfernen und entsorgen.
8. Nach dem Entfernen des Wärmepflasters kann es zu einer leichten Rötung der Haut kommen. Warten Sie mit einer erneuten Anwendung mit einem Wärmepflaster, bis diese Rötung vollständig abgeklungen ist.
9. Wenden Sie ein Wärmepflaster nicht länger als 8 Stunden in einem Zeitraum von 24 Stunden an.

5.0 Lagerung/Mindesthaltbarkeitsdauer des Wärmepflasters



- 5.1 Schützen Sie das Wärmepflaster vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Lagern Sie das Wärmepflaster in trockener Umgebung bei Zimmertemperatur.
- 5.2 Für Kinder, Säuglinge und Haustiere unzugänglich aufbewahren.
- 5.3 Verwenden Sie das Wärmepflaster nur bis zu dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Folienverpackung.

6.0 Entsorgung des Wärmepflasters

Nach der Anwendung des Wärmepflasters sollten Sie dieses gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit dem Hausmüll entsorgen. Fragen Sie im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt/Gemeinde oder einem Entsorgungsunternehmen nach.

7.0 Technische Daten

Modell/Typ: Kneipp Wärmepflaster KN1

Wärmeabgabe: Ca. 8 Stunden

Material: Eisenpulver, Aktivkohle, Wasser, Salz, Zellulose

8.0 Gewährleistung

Das von Ihnen erworbene Wärmepflaster wurde mit großer Sorgfalt entwickelt und hergestellt. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Bitte bewahren Sie den Kassenbeleg als Nachweis für den Kauf auf, um einen etwaigen Gewährleistungsanspruch geltend zu machen.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Mängel, die dem Kunden bereits beim Kauf bekannt waren, sowie Schäden durch unbefugte Eingriffe und Eigenverschulden des Kunden.

Wenden Sie sich bei Problemen, Reklamationen, Fragen und Gewährleistungsansprüchen zu diesem Artikel bitte an den lokalen Distributor oder dem Hersteller.

CE 0123



MEDINEO GmbH
Neumühle 2a
97727 Fuchsstadt

